

# QuikRead® CRP predplnené kyvety


Návod na použitie



1 Načítajte kartu.



2 Otvorte kyvetu.

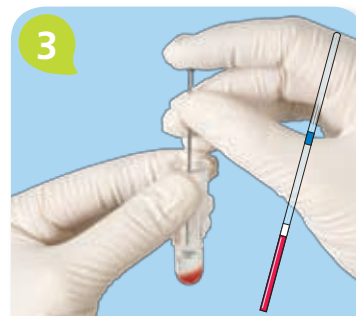

3 Vsuňte piestik do kapiláry, odoberte pacientovi 20 µl krvi (po bielu zátku), piestikom ju vytlačte do kyvety s pufrom.



4 Kyvetu uzavrite viečkom s čídlom, pretrepávajte (nie dnom nahor) až do vyčírenia roztoku. Potom vložte kyvetu do meracieho otvoru a odmerajte blank (asi 20 sekúnd).



5 Pridajte číidlo stlačením vnútornej modrej časti viečka.



6 Kyvetu vyberte a dôkladne miešajte prudkým trepaním dnom nahor podľa tempa na displeji až do pípnutia.



7 Ihneď po pípnutí vložte kyvetu nazad do meracieho otvoru. Za 1 minútu sa na displeji objaví výsledok.

Viac informácií  
nájdete v návode  
na použitie.