

- QuikRead® CRP
- QuikRead® FOB
- QuikRead® U-Alb
- QuikRead® Strep A

Už využívate prístroj QuikRead®?

Jednoduchší
postup
práce



Prístroj spĺňa všetky požiadavky Výnosu MZ SR
č. 09812/2008-OL z 10. 9. 2008
na materiálo-technické vybavenie ambulancií

QuikRead® CRP

s predplnenými kyvetami

CRP je vysoko citlivý zápalový marker

CRP sa zvyšuje do 6 – 12 hodín od začiatku zápalového procesu a používa sa na rozlíšenie bakteriálnej a vírusovej infekcie, zhodnotenie ťažkého poškodenia tkanív a monitorovanie efektívnosti antibiotickej liečby. Je dôležitým markerom pri hnisavej meningitíde, purulentnej otitíde, sinusitíde, bronchopneumónii, tonzilitíde, lymfadenitíde, akútnej apendicitíde, pyelonefritíde, endokarditíde, osteomyelitíde a flegmóne.



Stavte na väčšiu istotu
Vášho rozhodnutia!

QuikRead® CRP

s predplnenými kyvetami

kat.č.: 06078 (prístroj), 134191 (súprava), 68296 (kontrola)

POCT s výsledkami, ktorým môžete veriť

- Princípom merania je imunoturbidimetria, čo je metóda používaná v laboratóriu
- Jednoduchý a rýchly postup
- Výborná reprodukovateľnosť výsledkov
- Prístroj testovaný akreditovaným laboratóriom na Klinike laboratórnej medicíny v Bratislave a doporučený do ordinácií ambulantných lekárov

Kupujte len preverenú kvalitu!

Technická podpora zákazníkov

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
- Všetky doklady potrebné k vybaveniu úhrady výkonu 4571a s poisťovňami dostanete pri zaškolení prístroja
- Slovenský software, možnosť up-grade
- Možnosť zapožičaní prístroja
- Odborný informačný a konzultačný servis
- Dodanie testovacích súprav až do ordinácie zadarmo
- Náhradný prístroj počas prípadného servisu



Orion Diagnostica Oy, Finland

Bělohorská 57, 169 00 Praha 6
e-mail: orion@oriondiagnostica.cz
www.oriondiagnostica.sk

Odborná konzultácia:
MUDr. Marie Doleželová
tel.: +421 944 313 888



Jednoduchá obsluha



Načítajte kartu.



Pridajte 20 µl krvi do kyvety s pufrom.



Pridajte činidlo stlačením vnútornej časti viečka.



Výsledok CRP sa na displeji zobrazí do 1 minúty.

QuikRead®